

本CUSTOMER INFORMATION SHEET - 2では、Etest シングルパックの開封方法やEtest フォームパックの使用に便利なEtest専用アクセサリの使用方法などについてご紹介致します。

1. Etest シングルパック

Etest シングルパックは、1枚のストリップが除湿剤とともに個別包装されている、30枚包装製品の包装タイプです。全薬剤について-20℃～+8℃で保存でき、片手でも開けやすい特徴的な構造をしています。

※シングルパック包装タイプをもつ薬剤の種類は、最新のEtest製品リストでご確認ください。



■ Etest シングルパックの開封方法


- ① 図のように、親指と人差し指でアルミパッケージを挟み、親指の先端がアルミパッケージ裏側の窪み部分にくるようにパッケージを握ります。
- ② 親指を前方に押し、人差し指を手前に引くようにして、裏面のアルミフィルムの上部を折り、パッケージを開けます。アルミパッケージの上部に除湿剤が残っている事を確認して下さい。
- ③ アルミパッケージの上部を完全に折り曲げます。
- ④ 折り曲げた部分からピンセット等でEtestストリップを抜き取ります。

開けやすい特徴的な構造

A



B

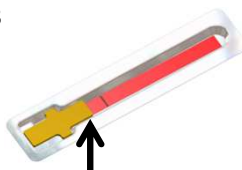

図Aの矢印部を押すと、図Bの矢印方向に力が加わり、板状の除湿剤でアルミフィルムが突き破られることによって、開封します。



1.



2.



3.



4.

2. Etest フォームパックとEtest専用アクセサリ

1) Etest フォームパック

Etest フォームパックは、1つのフォームカートリッジに100枚のストリップが封入され、除湿剤とともに包装されている、100枚包装製品の包装タイプです。常温あるいは冷蔵で保存可能です。保管温度(-20～+8℃あるいは-20～+22℃)は薬剤によって異なります。

※フォームパック包装タイプをもつ薬剤の種類は、最新のEtest製品リストでご確認ください。

■ Etest フォームパックの開封方法

フォームパックでは、100枚のストリップが封入されているカートリッジ1個が、除湿剤と共にアルミパックに入っています。

アルミパックの片方をはさみで切って、開封します。



保管温度によってラベルの色が異なります

●青色ラベル●
-20～+8℃

●ピンク色ラベル●
-20～+22℃

体外診断用医薬品

クラス I 細菌検査用シリーズ
薬剤感受性（一般細菌・ディスク法）キット
薬剤感受性試験用 **Etest** フォームパック
アモキシシリン/クラバン酸 XL AMOXI/CLAV F100

【有効成分】 アモキシシリン/クラバン酸 【包装】 100 枚入り
【貯蔵方法】 -20℃～+8℃ 【製造番号】 本体に表示
【使用期限】 本体のマークに表示

製造販売元
シスメックス・バイオメリー株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目2番2号 大崎セントラルタワー 8 階

体外診断用医薬品

クラス I 細菌検査用シリーズ
薬剤感受性（一般細菌・ディスク法）キット
薬剤感受性試験用 **Etest** フォームパック
アミカシン AK AMIKACIN F100

【有効成分】 アミカシン 【包装】 100 枚入り
【貯蔵方法】 -20℃～+22℃ 【製造番号】 本体に表示
【使用期限】 本体のマークに表示

製造販売元
シスメックス・バイオメリー株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目2番2号 大崎セントラルタワー 8 階

※実際の製品のデザインは、掲載の写真と異なる場合があります。


■ Etest フォームパックの保管方法

適切な温度下で除湿剤と一緒に密閉容器に入れて保管してください。

Etest クランプ(品番: 559809; 図C)を使ってフォームパックの開口部を完全に閉じる、或いは乾燥したEtest 除湿剤(品番: 559709; 図D)と一緒にEtest保管容器シリーズ(図E~G)に入れて保管します。



C Etest クランプ
(品番: 559809)

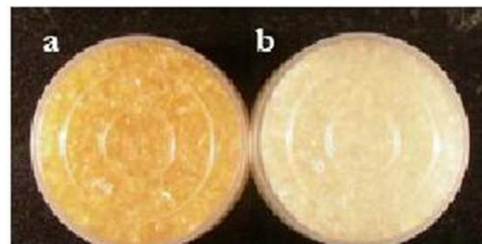

D Etest 除湿剤 (品番: 559709)

※ 濃い黄色/オレンジ(a)⇒乾燥状態
薄い黄色/白色(b)⇒70°Cで2時間乾燥、
或いは交換が必要



E Etest 保管容器 ミニ
(品番: 559900)
目安: カートリッジ2個



F Etest 保管容器
(品番: 559901)
目安: カートリッジ6個



G Etest 保管容器 ラージ
(品番: 559902)
目安: カートリッジ12個

2) その他Etest専用アクセサリ

■ Etest Mini Grip It (品番: 411200)

Etest Mini Grip Itは、Etestストリップを掴み、持ち上げ、動かすことを容易にするツールです。Etest Mini Grip Itの先についているサクシオンカップでストリップを吸い上げます。このツール自体を滅菌することも可能です。



○ Etest Mini Grip Itの使用方法:

- ① Etest Mini Grip Itでストリップを掴む前に、上部のバルブ(球状部)を強く握り、その状態のままで持ちます。
- ② Etest Mini Grip Itの先端のサクシオンカップをストリップ表面に接触させ、少しバルブへの圧力を弱めてストリップを持ち上げます。
- ③ 設置したい場所にストリップをおき、バルブを少し握ってストリップをサクシオンカップから離します。

○ Etest Mini Grip Itの保管方法:

室温(15~30°C)で保存してください。



■ Etest メジャースティック (品番: 559904)

Etest メジャースティックは、開封済みのフォームパックに残っているストリップ数の調べるためのツールです。

○ Etest メジャースティックの使用方法:

- ① フォームカートリッジに封入されているストリップの"E"印がある側にEtestメジャースティックを差し込み、底部にあるピンク色のフォームストリップにあたるまで押し込みます。
- ② ピンセットなどでやさしくEtestストリップを押し込み、スティックに記載されている目盛を読みます。その数字が、対象のフォームカートリッジに残っているEtestストリップのおおよその枚数です。



※実際の製品のデザインは、掲載の写真と異なる場合があります。

体外診断用医薬品 自己認証番号

薬剤感受性試験用 Etest シングルパック: 13A2X00243000038 薬剤感受性試験用 Etest フォームパック: 13A2X00243000039

酵母様真菌薬剤感受性試験用 Etest シングルパック: 13A2X00243000040 酵母様真菌薬剤感受性試験用 Etest フォームパック: 13A2X00243000041

🔗 使用方法などのEtestの製品情報にアクセス 🔗

<http://products.sysmex-biomerieux.net/clinical/c015.php>

バイオメリューは、世界の感染症と戦う
臨床検査のリーディングカンパニーです。

製造販売元

シスメックス・バイオメリュー株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 大崎セントラルタワー8F

www.sysmex-biomerieux.jp