

バイダス検体処理液 (Serum Free)

活性炭処理ヒト血清 (Human serum treated with charcoal)

用途

バイダス検体処理液は活性炭処理血清で、バイダス アッセイキットを用いて検体を測定するときに検体希釈液として用いてください。

試薬の構成

調整済み

2本 × 5 mL

(活性炭処理ヒト血清* + 1g/L アジ化ナトリウム)

*: 本品は、HBs 抗原、HIV-1、HIV-2 抗体および HCV 抗体に陰性であることが、確認されていますが、取扱いには、生物学的安全性の見地から十分に注意してください。

使用方法

測定に用いるバイダス アッセイキットの添付文書を参照してください。

保管方法

2-8℃で保存してください(禁凍結)。

使用期限は、パッケージに記載してあります。

使用上の注意

- *in vitro* 試験のみににおいて使用してください。
- 熟練者が使用してください。
- 本品はヒト由来の原料を含みます。知られた分析方法は、感染性のある病原体がないことを保証するものではありません。これらは潜在的に感染の可能性があるものとして、十分注意の上お取り扱いください(ラボバイオアッセイマニュアル - WHO - Geneva - 最新版)。
- 本品は、爆発性の金属アジドを形成する鉛または銅製の配管と反応するアジ化ナトリウムを含みます。アジ化ナトリウムを含む溶液がそのような配管に曝露される場合は、金属アジドの形成を避けるために水と一緒に流してください。

廃棄処理

未使用の試薬は、有害化学物質廃棄物の処理手順に従って処分してください。

使用済み試薬および他の汚染廃棄物は全て、感染性もしくは感染の危険のある製品の取扱い方法に従って行ってください。起こりうる危険を適切に考慮の上、各検査室の責任の元、廃棄産物や流出物はそれぞれの危害毒性や度合いを考慮し、地域の適切な規制に従って廃棄してください。

記号

記号	内容
	品番
	製造元
	保管温度
	使用期限
	ロット番号
	添付文書を参照

(問い合わせ先)

製品関連

ビオメリュー・ジャパン株式会社

臨床(病院、臨床検査センターなど) TEL: 0120-265-034

産業(企業、保健所など) TEL: 0120-022-328

注文・納期・在庫関連

ビオメリュー・ジャパン株式会社

TEL: 03-6834-2669(代表)

ビオメリュー・ジャパン株式会社

BIOMÉRIEUX

東京都港区赤坂二丁目 17 番 7 号
赤坂溜池タワー2 階
Tel: 03-6834-2666 / Fax: 03-6834-2667
<http://www.biomerieux.co.jp>



bioMérieux SA

376 Chemin de l'Orme
69280 Marcy-l'Etoile/France
Tel.33(0)4 78 87 20 00 /
Fax33(0)4 78 87 20 90
<http://www.biomerieux.com>

