

ペプトン水Peptone water
インドール産生試験*For microbiological control only*

42085 試験管培地 20 本(9mL)

保管方法

2-25°C

組成(g/L)カゼインペプトン* 15g
pH7.0

*動物由来原料

原理

ペプトン水は特別な培養条件を必要としない細菌を増殖させることができます。本培地はトリプトファン濃度が高いため特にインドール試験に使われます。

使用法

サンプルを接種し、37°Cで24-48時間培養します。

判定

培養後菌がよく発育したら、コバック試薬(ref. 55631)を5あるいは6滴滴下しインドール産生試験をします。
試験管をよく振ってください; 表面が赤い色となった場合はインドール陽性と判定します。

参考文献

1. BUCHANAN R. E., GIBBONS N. E. – Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. – 1980, Williams & Wilkins Co., Baltimore, Md.
2. COWENS S. T., STEEL K. J. – Manual for the Identification of Enterobacteriaceae. – 1970, Cambridge University Press, Cambridge, U. K.

(問い合わせ先)

製品関連

ビオメリュー・ジャパン株式会社

臨床(病院、臨床検査センターなど) TEL: 0120-265-034

産業(企業、保健所など) TEL: 0120-022-328

注文・納期・在庫関連

ビオメリュー・ジャパン株式会社

TEL: 03-6834-2666(代表)

*本添付文書は、下記 Web サイトからダウンロードできます。

<http://www.biomerieux-jp.net/>**ビオメリュー・ジャパン株式会社**

〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目17番7号赤坂溜池タワー2階

Tel: 03-6834-2666 / Fax: 03-6834-2667

<http://www.biomerieux.co.jp>**bioMérieux SA**376 Chemin de l'Orme
69280 Marcy-l'Etoile/France
Tel.33(0)4 78 87 20 00 /
Fax33(0)4 78 87 20 90
<http://www.biomerieux.com>**BIOMÉRIEUX**